

Deutsch

PL Chip Reservoir set Packungsbeilage

Enthält Zubehör zur Verwendung mit dem PL Chip

VERWENDUNGSZWECK:

Der PL Chip Reservoir set enthält Zubehör zur Verwendung mit dem PL Chip.

ZUSAMMENFASSUNG:

Der PL Chip Reservoir set enthält Einwegzubehör, das zusammen mit dem PL Chip zur Messung der primären hämostatischen Fähigkeit von Vollblutproben verwendet wird.

Weitere Einzelheiten zur Verwendung des PL Chip Reservoir set finden Sie in der Gebrauchsanweisung vom PL Chip und im Benutzerhandbuch für T-TAS.

BEREITGESTELLTE MATERIALIEN:

Der PL Chip Reservoir set enthält 100 Sätze von Reservoirs, Deckeln und Überkappen.

Punkt	Inhalt	Katalognummer
PL Chip Reservoir set	100 Sätze	18003

WARNUNGEN UND VORSICHTSMAßNAHMEN:

- Nur zur Verwendung für die In-vitro-Diagnostik.
- Nur zur Verwendung durch geschultes Fachpersonal.
- Gebrauchte Reservoirs, Deckel und Überkappen sind potenziell infektiös. Methoden zur ordnungsgemäßen Handhabung und Entsorgung sollten in Übereinstimmung mit lokalen, Länder- und Bundes-Vorschriften befolgt werden.
- Befolgen Sie sorgfältig die in dieser Packungsbeilage beschriebenen Anweisungen und Verfahren.
- Verwenden Sie keine Materialien, die verbogen, deformiert oder gebrochen sind oder Fremdkörper enthalten.

ANFORDERUNGEN AN LAGERUNG UND HANDHABUNG:

Bewahren Sie unbenutzte PL Chip Reservoir set bei Raumtemperatur auf. Nehmen Sie das Reservoir, die Deckel oder Überkappen erst dann aus dem Beutel, wenn sie zur Anwendung kommen.

UNTERSTÜTZUNG:

Zur Unterstützung wenden Sie sich bitte an Ihren lokalen Händler.


DEFINITION DER SYMBOLE:

Symbol	Definition
	Nicht wiederverwenden
	CE-Kennzeichnung
	Gebrauchsanweisung beachten
	Chargencode
	Bestellnummer
	In-vitro-Diagnostikum
	Hersteller

Symbol	Definition
	Bevollmächtigter in der Europäischen Union
	Enthält ausreichend Material für <n> Tests
	Dieses Produkt darf nur durch einen Arzt oder auf ärztliche Anordnung verkauft werden.
	Importeur



ZACROS Corporation
1-1-1 Koishikawa, Bunkyo-ku,
Tokyo 112-0002 Japan

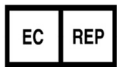

MDSS GmbH
Schiffgraben 41 30175 Hannover, Germany



MedEnvoy Global B.V.
Prinses Margrietplantsoen 33 - Suite 123
2595 AM The Hague
The Netherlands

T-TAS® is a registered trademark of ZACROS Corporation.

©2024 ZACROS Corporation

All rights reserved

