

Italiano

BAPA tube

REF	18004	CONTENT	50 provette
------------	-------	----------------	-------------

Destinazione d'uso

La BAPA tube è destinata ad essere utilizzata per il prelievo, il trasporto e la conservazione di campioni di sangue da utilizzare con il sistema T-TAS.

Sommario

BAPA (Benzylsulfonyl-D-argininyl-prolyl-4-amidinobenzylamide), un inibitore della trombina e del fattore Xa, permette l'anticoagulazione del sangue senza interferenze con i livelli fisiologici di calcio. La concentrazione specificata di BAPA nel sangue raccolto è $\geq 50 \mu\text{g/mL}$.

Provetta per il prelievo del sangue

50 x 3 mL provette contenenti anticoagulante BAPA atomizzato

Avvertenze e precauzioni

- Solo per uso diagnostico in vitro.
- Solo per uso da parte di personale qualificato.
- Il sangue umano deve essere trattato come potenzialmente infettivo e si devono seguire le precauzioni universali.
- Lo smaltimento di tutti i materiali di scarto deve essere conforme alle direttive locali, statali e federali.
- Non utilizzare le provette se al loro interno sono presenti corpi estranei.
- Non utilizzare le provette dopo la data di scadenza.

Precauzioni per il prelievo del sangue

- Utilizzare aghi da 21 G o più grandi (calibro 18-20) per il prelievo del sangue.
- Mescolare il sangue capovolgendo delicatamente la provetta per 5 volte subito dopo averla riempita.

Conservazione e stabilità

- Conservare le provette per il prelievo non utilizzate tra i 5°C e i 30°C. Evitare l'esposizione alla luce diretta del sole.
- Il prodotto è stabile fino alla data di scadenza stampata sull'etichetta della provetta se conservato in queste condizioni.

Nota: Lo scostamento dalle condizioni di conservazione raccomandate può portare a un deterioramento della qualità della provetta.

Riferimenti

Per ulteriori informazioni sulle misurazioni con la BAPA tube, consultare il manuale d'uso del T-TAS e il/i foglietto/i illustrativo/i del test.

Simboli



: Numero di catalogo




: Codice lotto



: Data di scadenza



: Per uso diagnostico
in vitro

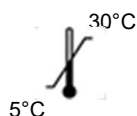

: Limite di
temperatura




: Non riutilizzare



: Sterilizzazione
per radiazione



: Consultare le
istruzioni per l'uso

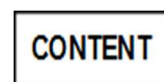

: Quantità per
scatola



: Conformità
Europea



: Rappresentante autorizzato
dell'Unione Europea



: Fabbricante



: Questo dispositivo è limitato alla vendita da
parte di o su ordine di un operatore sanitario
autorizzato.



: Importatore



ZACROS Corporation

1-1-1 Koishikawa, Bunkyo-ku, Tokyo 112-0002 Japan



MDSS GmbH

Schiffgraben 41, 30175 Hannover, Germany



MedEnvoy Global B.V.

Prinses Margrietplantsoen 33 - Suite 123

2595 AM The Hague

The Netherlands

T-TAS® è un marchio registrato di ZACROS Corporation.

©2024 ZACROS Corporation

Tutti i diritti riservati

