

Ελληνικά

BAPA tube for T-TAS[®]01

REF

18004

CONTENT

50 σωλήνες

Προβλεπόμενη χρήση

Το BAPA tube για T-TAS 01 προορίζεται να χρησιμοποιηθεί για τη λήψη, μεταφορά και αποθήκευση δειγμάτων αίματος για χρήση με το σύστημα T-TAS 01.

Περίληψη

Το BAPA (Benzylsulfonyl-D-argininyl-prolyl-4-amidinobenzylamide), ένας αναστολέας της θρομβίνης και του παράγοντα Χα, επιτρέπει την αντιπηκτική δράση του αίματος χωρίς παρεμβολή στα φυσιολογικά επίπεδα ασβεστίου.

Η καθορισμένη συγκέντρωση BAPA στο αίμα που λαμβάνεται είναι ≥ 50 $\mu\text{g/mL}$.

Σωληνάριο αιμοληψίας

Σωληνάρια 50 x 3 mL που περιέχουν αντιπηκτικό BAPA αποξηραμένο με ψεκασμό

Προειδοποιήσεις και προφυλάξεις

- Μόνο για in vitro διαγνωστική χρήση.
- Για χρήση μόνο από εκπαιδευμένους επαγγελματίες.
- Το ανθρώπινο αίμα θα πρέπει να αντιμετωπίζεται ως δυνητικά μολυσματικό και θα πρέπει να τηρούνται οι καθολικές προφυλάξεις.
- Η διάθεση όλων των αποβλήτων πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τις τοπικές, πολιτειακές και ομοσπονδιακές οδηγίες.
- Μην χρησιμοποιείτε σωληνάρια εάν υπάρχουν ξένα σώματα στο σωληνάριο.
- Μη χρησιμοποιείτε σωληνάρια μετά την ημερομηνία λήξης τους.

Προφυλάξεις για την αιμοληψία

- Χρησιμοποιήστε βελόνες G 21 ή μεγαλύτερης οπής (G 18-20) για την αιμοληψία.
- Ανακατέψτε το αίμα αναστρέφοντας απαλά το σωληνάριο 5 φορές αμέσως μετά την πλήρωση.

Αποθήκευση και σταθερότητα

- Αποθηκεύστε τα αχρησιμοποιήτα σωληνάρια αιμοληψίας στους 5 έως 30 °C. Αποφύγετε την έκθεση στο άμεσο ηλιακό φως.
- Το προϊόν είναι σταθερό μέχρι την ημερομηνία λήξης που αναγράφεται στην ετικέτα του σωληναρίου όταν φυλάσσεται υπό αυτές τις συνθήκες.

Σημείωση: Η απόκλιση από τις συνιστώμενες συνθήκες αποθήκευσης μπορεί να οδηγήσει σε αλλοίωση της ποιότητας του σωληναρίου.

Βιβλιογραφικές αναφορές

Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τις μετρήσεις κατά τη χρήση του BAPA tube for T-TAS 01, ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο χρήστη T-TAS 01 και στα ένθετα συσκευασίας με την ανάλυση.

Σύμβολα



: Αριθμός καταλόγου




: Κωδικός παρτίδας



: Χρήση με βάση την ημερομηνία



: Διαγνωστικό ιατροτεχνολογικό προϊόν in vitro

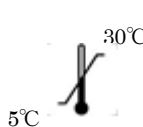

: Όριο θερμοκρασίας




: Μην επαναχρησιμοποιείτε



: Στείρο




: Συμβουλευτείτε τις οδηγίες χρήσης

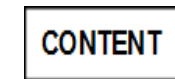

: Ποσότητα ανά χαρτοκιβώτιο




: Σήμα CE

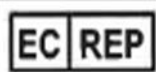

: Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα



: Κατασκευαστής

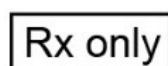

: Αυτό το προϊόν περιορίζεται στην πώληση από κατόπιν εντολής αδειοδοτημένου ιατρού



: Εισαγωγέας



FUJIMORI KOGYO CO., LTD.
1-1-1 Koishikawa, Bunkyo-ku, Tokyo
112-0002 Japan



Medical Device Safety Service GmbH
Schiffgraben 41 30175 Hannover, Germany



EU Importer
MedEnvoy
Prinses Margrietplantsoen 33 - Suite 123
2595 AM The Hague
The Netherlands

